

1. 緑の電源ON/OFFボタンを押すと電源が入ります。



「パッドを胸に装着して下さい。
ランプが点滅しているソケットに
パッドのコネクタを接続して下さい。」

2. 電極パッドを体に貼ります。コネクタを接続します。



2つのパッドを貼りコネクタを接続すると、AEDが自動で解析を開始します。

「心電図を解析中です。身体に触れないで下さい。」

ショックが必要な場合

「ショックが必要です。
身体から離れて下さい。」

ショックが不要な場合

「ショックは不要です。」
「一時中断中です。」

「胸骨圧迫と人工呼吸をしてください」

3. ショックボタンを押します。



電気ショック




「点滅しているオレンジのボタンを押して下さい。」

「ショックが完了しました。」

「一時中断中です。」

「ただちに胸骨圧迫と人工呼吸をして下さい。」

・全体の流れ

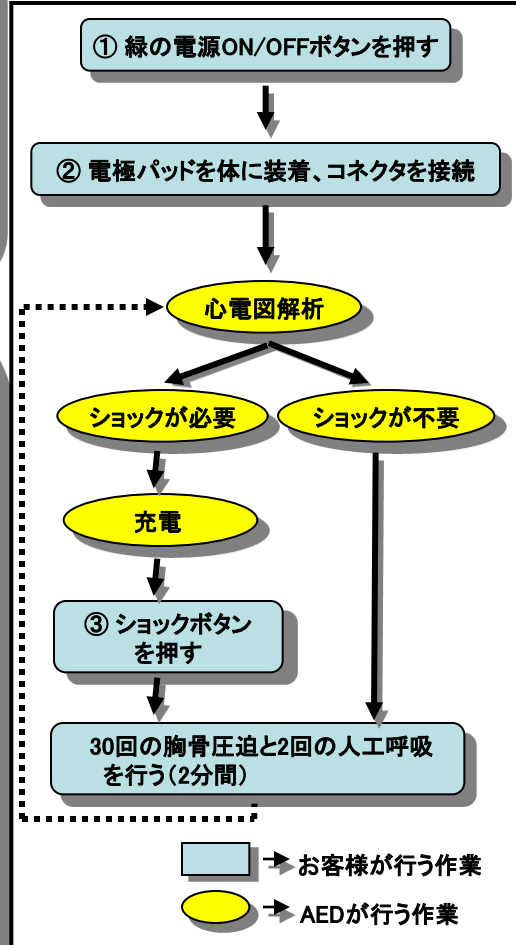

胸骨圧迫30回、人工呼吸2回を交互に2分間行います。



*** 救急車が到着するまでAEDの電源は入れたまま！
電極パッドは貼ったままにしてください！！**

